

Aby zmienić schemat interpretacji:

- kliknij kolejno: Mój Komputer -> dysk C: -> Program Files -> Cardio Control -> MDW -> -> Modules -> Resources -> pl -> xecg.txt
- w notatniku otworzy się plik xecg.txt
- wpisz na samym początku tekstu wyraz: Schemat (lub Wzór)
- naciśnij klawisz Enter
- naciśnij klawisz spacja
- wpisz swój własny tekst Interpretacji, który chcesz żeby był dostępny jako schemat (pamiętaj aby zostawić jedno miejsce odstępu (spacja) przed pierwszym wyrazem tekstu interpretacji !!!)
- zamknij [X] zatwierdzając zmiany

Aby dodać lekarza do listy:

- kliknij przycisk inicjujący próbę wysiłkową (wyskoczy okienko z nazwiskami lekarzy, nazwą aktualnego protokołu próby wysiłkowej, etc.)
- kliknij przycisk [...] obok pola z nazwiskiem lekarza przed rozpoczęciem próby
- wprowadź dane i zatwierdź: OK

Aby dodać/usunąć lekarzy do listy poprzez panel administracyjny:

- kliknij: Start -> Programy -> Welch Allyn -> Administrator Tool
- użytkownik: admin, hasło: admin
- kliknij zakładkę Zarządzanie Danymi
- kliknij Referring Physicians
- kliknij Nowy Lekarz
- wprowadź dane i zatwierdź: OK

Aby usunąć pojedyncze badanie:

- uruchom aplikację Cardio Perfect
- wybierz pacjenta (pierwsza litera/-y nazwiska i przycisk Idź)
- wybierz z listy poniżej które z badań danego pacjenta chcesz usunąć (musi być podświetlone na niebiesko)
- kliknij Ctrl+Delete (przytrzymując Ctrl wciśnij Delete)

Aby usunąć całego pacjenta:

- kliknij: Start -> Programy -> Welch Allyn -> Administrator Tool
- użytkownik: admin, hasło: admin
- kliknij zakładkę Zarządzanie Danymi
- kliknij Patients
- kliknij przycisk Wyszukuj
- wybierz pacjenta do skasowania (musi być podświetlony na niebiesko)
- kliknięcie przycisku Usuń Pacjenta nieodwracalnie usunie danego pacjenta z bazy i wszystkie jego badania